

ottobock.

# 3E80

Ваше первое знакомство с электронно-механическими системами протезирования нижних конечностей

Quality for life



## 3E80

# Умная техника поможет сделать Вашу жизнь еще богаче

Ходить спокойным или быстрым шагом, преодолевать наклоны или неровные поверхности – просто быть мобильным. Электронный коленный шарнир 3E80 предлагает Вам широкий спектр функциональных возможностей и повышенную безопасность, которая позволит Вам расширить диапазон своей мобильности для решения самых разных бытовых задач.

Коленный шарнир 3E80 поможет Вам справиться и с такими сложными ситуациями, как спуск по лестнице или прохождение участков с уклоном. А если Вы хотите, то выполнив качание передней частью стопы, Вы можете активировать велосипедный режим и сесть за руль велосипеда!

### **Современная техника с простым управлением**

Коленный шарнир 3E80 объединяет в себе преимущества традиционной ротационной гидравлической

системы с системой электронного контроля и управления. Запатентованная система сенсоров обеспечивает значительную устойчивость и свободу движений. Коленный шарнир автоматически реагирует на все изменения при ходьбе и регулирует свою функциональность с каждым шагом пользователя, даже в условиях повышенной активности. Кроме того, коленный шарнир 3E80 подкупает еще и своими возможностями настройки: все настройки можно выполнить легко и исключительно вручную.

### **Прочный, стойкий и не требует трудоемкого обслуживания**

С коленным шарниром 3E80 Вам будет по плечу решение многих задач повседневной жизни. Ведь этот коленный шарнир отличается прочностью, материал его верхнего покрытия прост в уходе, и вся система не требует трудоемкого обслуживания.



## Подойдет ли мне протез с коленным шарниром ЗЕ80?

**ЗЕ80 подходит для пользователей, которые отвечают следующим требованиям:**

- Уровень ампутации: экзартикуляция коленного сустава или бедра (KD, TF)
- Уровень активности 3 или 4 (пациенты с неограниченными возможностями передвижения во внешнем мире с нормальными или повышенными требованиями к протезированию)
- Вес тела до 125 кг
- Рост от ок. 120 см

Во многих ортопедических мастерских предлагается возможность изготовления пробного протеза с использованием коленного шарнира ЗЕ80. Для получения консультации мы просим Вас обратиться в Ваше специализированное учреждение.



ООО Otto Bock Service  
p/o Pultikovo, Business Park «Greenwood»,  
Building 7, 69 km MKAD  
143441 Moscow Region/Krasnogorskiy Rayon  
Russian Federation  
T +7 (0) 495 564 8360 · F +7 (0) 495 564 8363  
info@ottobock.ru · www.ottobock.ru